

Najważniejsze cechy wstrzykiwacza typu pen

Praluent wstrzykiwacz typu pen jest przeznaczony do podawania leku w pojedynczych wstrzyknięciach raz na miesiąc. Został zaprojektowany w taki sposób, aby pacjent mógł podawać lek w domu.

Fabrycznie napełniony pen bez przycisku aktywacyjnego

Fabrycznie napełniony pen bez przycisku aktywującego jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i działa bez konieczności naciskania przycisku. Jedno „kliknięcie” informuje o rozpoczęciu wstrzyknięcia, a drugie „kliknięcie” o jego zakończeniu.

Okienko kontrolne

Po zakończeniu wstrzyknięcia całe okienko zmienia kolor na żółty, co świadczy o tym, że została podana pełna dawka leku.


Żółta osłonka zabezpieczająca

Zawiera igłę do wstrzykiwań.

Niebieska osłonka

Chroni przed ukłuciem.

Przed dokonaniem wstrzyknięcia należy przygotować :

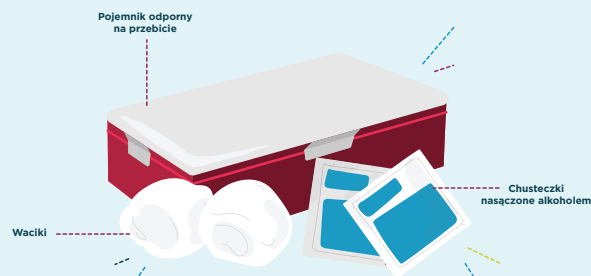

Praluent® (alirocumab) FABRYCZNIE NAPEŁNIONY WSTRZYKIWACZ TYPU PEN

Zawiera 300 mg alirocumabu
w 2 ml roztworu

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DAWKA 300 mg RAZ NA MIESIĄC



sanofi

©2022, Sanofi

MAT-PL-2201483-1.0-07/2022

Praluent®

Zanim zaczniesz

1 Pozostaw wstrzykiwacz na 45 minut w temperaturze pokojowej

- ✓ Przed użyciem należy wyjąć wstrzykiwacz z lodówki i ogrzać w temperaturze pokojowej przez 45 minut. Jest to ważne w celu podania całej dawki i pomaga zminimalizować dyskomfort
- ✗ Nie podgrzewaj wstrzykiwacza, pozwól samodzielnie się ogrzać w temperaturze pokojowej
- ✗ Nie wkładaj wstrzykiwacza z powrotem do lodówki

2 Spójrz na etykietę wstrzykiwacza

- ✓ Sprawdź, czy masz właściwy produkt w odpowiedniej dawce
- ✓ Data ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca podanego na opakowaniu kartonowym
- ✗ Nie należy używać, jeśli upłynął termin ważności lub jeśli wstrzykiwacz został upuszczony lub uszkodzony

3 Spójrz na okienko

- ✓ Należy sprawdzić, czy płyn jest przejrzysty, bezbarwny lub bladożółty, bez stałych cząstek (rys. A). W przeciwnym wypadku nie należy używać.
- ✓ Może pojawić się pęcherzyk powietrza. Jest to zjawisko normalne
- ✗ Nie należy stosować, jeśli okienko ma jednolity żółty kolor (rysunek B) lub jeśli roztwór jest odbarwiony, mętny lub widoczne są w nim płatki lub drobinki



Rysunek A



Rysunek B

4 Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia

- ✓ Umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć ręcznikiem
- ✓ Skórę w miejscu wstrzyknięcia należy przemyć chusteczką nasączoną alkoholem
- ✓ Dla każdego wstrzyknięcia należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia. Jeśli zastrzyk trzeba wykonać po tej samej stronie, należy upewnić się, że nie jest to to samo miejsce, co ostatnim razem
- ✓ Zastrzyk można wykonać w pozycji stojącej lub siedzącej
- ✗ Nie należy wstrzykiwać preparatu w miejsce, w którym skóra jest bolesna, stwardniała, zaczerwieniona lub nadmiernie ocieplona.
- ✗ Nie należy podawać preparatu Praluent z innymi zastrzykami w tym samym miejscu
- ✗ Nie należy wstrzykiwać w odległości mniejszej niż 5 cm od pępka
- ✗ Nie należy wstrzykiwać w miejsca w pobliżu widocznych żył

Zalecane miejsca iniekcji

W odległości 5 cm od pępka

Górna część uda


Zewnętrzna strona lub górna część ramienia
(Tylko przez opiekuna)

- Miejsca, w których iniekcja może zostać wykonana samodzielnie lub przez opiekuna
- Miejsca, w których iniekcja może zostać wykonana tylko przez opiekuna
- Miejsca, w których iniekcja nie może zostać wykonana

Jak zrobić zastrzyk ?


1 Zdejmij niebieską osłonkę

- ✗ Nie stosuj, jeśli brakuje niebieskiej osłonki lub gdy jest ona obłuzowana
- ✗ Nie zdejmuj osłonki, dopóki nie będziesz gotowy do wstrzyknięcia
- ✗ Nie nakładaj ponownie niebieskiej osłonki

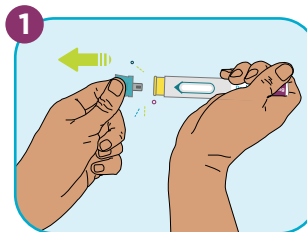


2 Trzymaj wstrzykiwacz w pozycji pionowej

- ✓ Okienko powinno być dobrze widoczne. Skieruj je w swoją stronę, żółtą osłonką zabezpieczającą do dołu
- ✗ Nie przyciskaj wstrzykiwacza do skóry, dopóki nie będziesz gotowy do iniekcji
- ✗ Nie dotykaj żółtej osłonki zabezpieczającej, ponieważ wewnątrz znajduje się igła

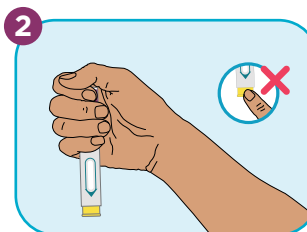


3 Przyłóż żółtą osłonką do skóry pod kątem około 90° stopni

- ✓ Złap skórę kciukiem i palcem wskazującym, aby ustabilizować miejsce wstrzyknięcia i trzymaj skórę w ten sposób podczas iniekcji
- ✓ Przyciśnij wstrzykiwacz do skóry pod kątem 90°, aż żółta osłonka zabezpieczająca schowa się w jego środku. Przytrzymaj w miejscu
- ✓ Wstrzyknięcie nie rozpocznie się, dopóki żółta osłonka całkowicie się nie schowa. Po rozpoczęciu wstrzyknięcia usłyszysz kliknięcie, a okienko zacznie zmieniać kolor na żółty

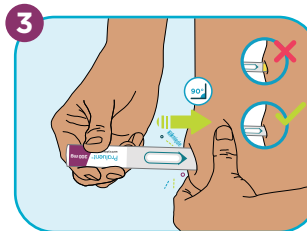

4 Nie odrywaj wstrzykiwacza od skóry


- ✓ Przytrzymaj go w miejscu, aż okienko całkowicie zabarwi się na żółto. Możesz usłyszeć drugie kliknięcie
- ✓ Gdy całe okienko stanie się żółte, powoli policz do pięciu

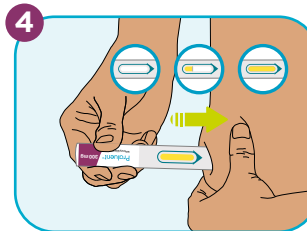

Jak wstrzykiwać

5 Przed oderwaniem wstrzykiwacza, sprawdź ponownie, czy okienko zmieniło kolor na żółty

- ✓ Przed oderwaniem wstrzykiwacza upewnij się, że całe okienko jest żółte
- ✓ Jeśli okienko nie zmieniło koloru na żółty, należy oderwać pena i skonsultować się z firmą Sanofi
- ✓ W przypadku pojawienia się krwi należy przyciskać wacik lub gazę w miejscu wstrzyknięcia do momentu ustania krwawienia
- ✗ Nie należy robić sobie drugiego zastrzyku bez porozumienia z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką
- ✗ Nie należy pocierać skóry po wstrzyknięciu

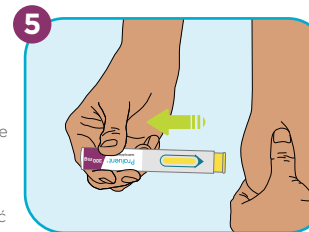

6 Wyrzucić wstrzykiwacz i osłonkę igły

- ✓ Bezpośrednio po użyciu wyrzucić wstrzykiwacz oraz osłonkę igły do odpornego na przebicie-pojemnika. Pojemnik należy zawsze przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- ✓ Zapytaj swojego lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jak zutylizować pojemnik
- ✗ Nie należy zakładać z powrotem niebieskiej osłonki po jej zdjęciu
- ✗ Nie należy używać wstrzykiwacza ponownie
- ✗ Nie należy wyrzucać żadnych leków do kanalizacji lub domowych pojemników na odpady

